


Accu-Chek® Mobile
Le Tout-en-un
Le lecteur sans bandelette

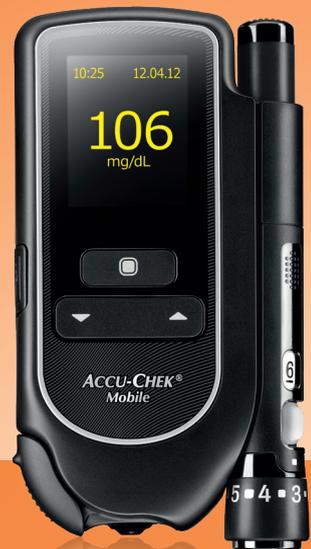

ACCU-CHEK®

Insertion d'une cassette


après avoir réalisé 50 mesures




Ouvrez le capot de protection jusqu'à la butée.



Faites glisser le cran de sécurité du couvercle vers le haut.

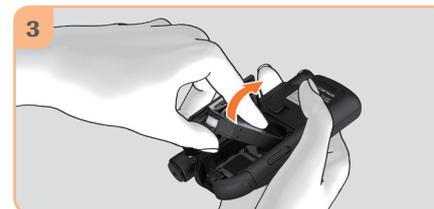

Retirez la cassette usagée*.

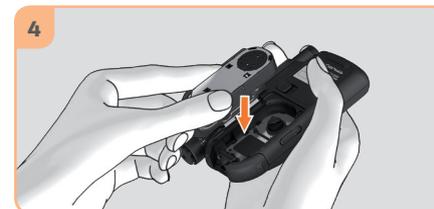

Insérez une nouvelle cassette. Refermez ensuite le couvercle, puis le capot.

* À éliminer selon la réglementation relative au DASRI.

Ceci est un mode d'emploi simplifié. Pour plus d'information, référez-vous au manuel d'utilisation Accu-Chek Mobile et à la notice des cassettes-test.

Insertion d'un barillet

après avoir utilisé les 6 lancettes



Retirez l'embout et le barillet usagé*.



Insérez un nouveau barillet, le bout blanc en premier. Replacer ensuite l'embout.

Souvenez-vous :



Sélectionnez lors de la première utilisation la plus faible profondeur de piqûre (0.5) en tournant l'embout rotatif.



Pensez à changer la lancette avant chaque mesure de la glycémie en actionnant le levier d'avant en arrière.


4 étapes pour mesurer simplement la glycémie



Ouvrez le capot de protection.



Piquez-vous le doigt pour obtenir une goutte de sang.

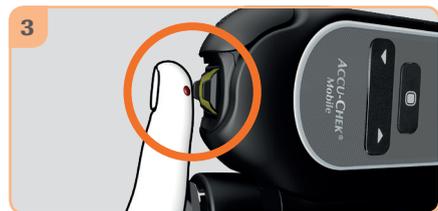

Appliquez la goutte de sang au centre de la zone réactive.




Lisez le résultat et refermez le capot.

Seule une manipulation conforme du lecteur conduit à des résultats de glycémie exacts, qui permettent des décisions thérapeutiques adaptées. Par conséquent, respectez rigoureusement ces instructions.


4 fondamentaux pour une manipulation conforme



Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon. Rincez-les bien et séchez-les soigneusement avec une serviette propre.

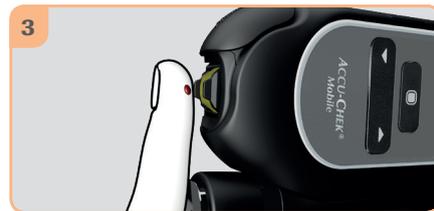

Effleurez d'un geste précis le centre de la zone réactive avec la goutte de sang.

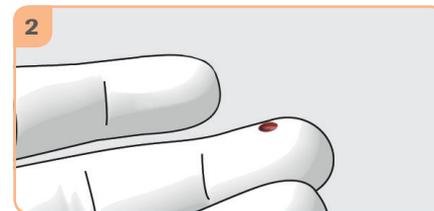

Utilisez toujours une petite **goutte de sang frais bien formée**. Ne laissez pas la goutte s'étaler sur le doigt.



Appliquez la goutte de sang sur la zone réactive **immédiatement** après l'avoir obtenue. Enlevez votre doigt de la zone réactive dès que le message *Mesure en cours* s'affiche et que le signal sonore (si activé) retentit.



Accu-Chek® Mobile

Le Tout-en-un Le lecteur sans bandelette

01/2018. Le kit Accu-Chek Mobile est un dispositif d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) - Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ce kit composé de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de dispositifs médicaux est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. FR-17-205. 1801ROCHEDCGP001

Assistance ACCU-CHEK®

0800 27 26 93

Service & appel gratuits



Agissez pour le recyclage des papiers avec Ecofolio.

Experience what's possible®.

* Découvrez un monde de possibilités.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et FASTCLIX sont des marques déposées de Roche.

© 2018 Roche Diabetes Care France

www.accu-chek.fr

Roche Diabetes Care France
2, avenue du Vercors - 38240 Meylan



ACCU-CHEK®